




Bedienungsanleitung & Maßtabelle Proplugs

Anatomisch geformte Ohrstöpsel

DOC'S PROPLUG® helfen Ihnen, sich vor dem so genannten „Schwimmerohr“ (Otitis Externa) zu schützen. Diese Entzündung kann bei regelmäßigem Kontakt mit Wasser auftreten und ist vor allem in feuchten Tropengebieten verbreitet, wo das Klima das Wachstum von Bakterien und Pilzen fördert. Die Verwendung der PROPLUGS bei gerissenem Trommelfell oder Paukenröhrchen muss erst mit einem Arzt abgeklärt werden.

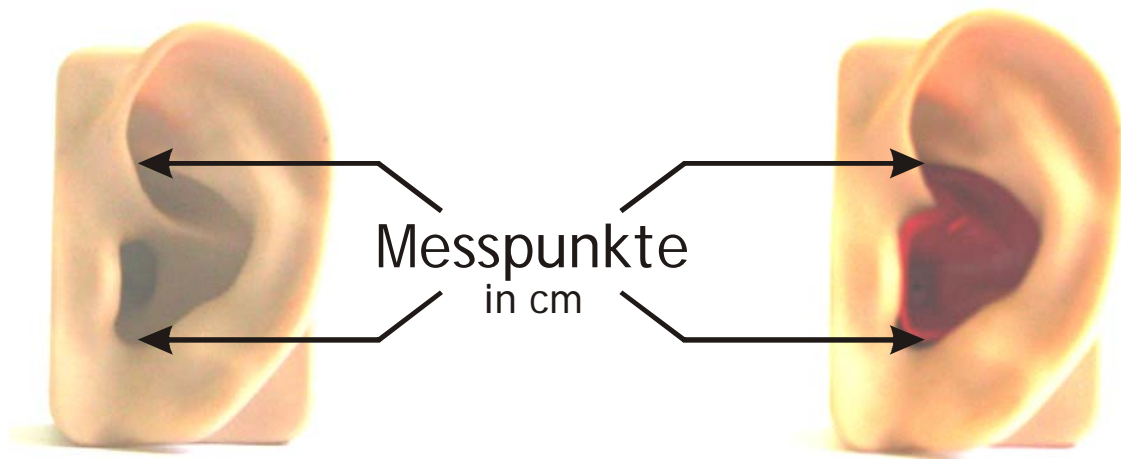

Maß genommen werden muss wie oben auf dem Bild beschrieben, von Messpunkt zu Messpunkt.

Verfügbare Größen:

Tiny:	2,0 cm
X-Small (XS):	2,2 cm
Medium-Small (MS):	2,3 cm
Small (S):	2,5 cm
Medium (M):	2,7 cm
Large (L):	3,0 cm
X-Large (XL):	3,3 cm
XX-Large (XXL):	3,5 cm



So funktionieren DOC'S PROPLUG®:

Wählen Sie einen PROPLUG der genau zwischen den Tragus (**Abbildung A, Nr. 1**) und die Anti-Helix (**Abbildung A, Nr. 2**) passt. Der PROPLUG dehnt sich leicht aus und dichtet den Ohrkanal komplett ab. Die Form des Ohrs wird durch Kauen, Gähnen und die Bewegung der Muskeln im Gesicht und Nacken ständig leicht verändert. Durch die Flexibilität des Materials und einen Memory-Effekt passen sich die PROPLUGS jedoch immer an das Ohr an und dichten den Ohrkanal ab.

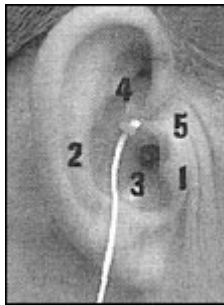


Abbildung A


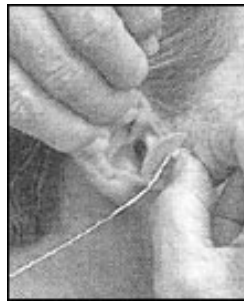


Abbildung B

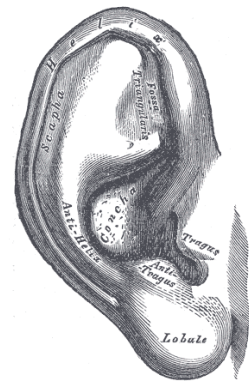

Einsetzen der PROPLUGS:

Diese Beschreibung wurde für das Einsetzen in das rechte Ohr verfasst. Verwenden Sie beim ersten Mal einen Spiegel um die korrekte Positionierung zu gewährleisten:

Halten Sie den PROPLUG mit dem Daumen und Zeigefinger der rechten Hand (**Abbildung B**). Fassen Sie mit der linken Hand um den Kopf und ziehen Sie die Ohrmuschel sanft schräg nach hinten/oben. Mit dieser Bewegung weitet sich der Ohrkanal (**Abbildung A, Nr. 3**) leicht und erleichtert das Einsetzen des PROPLUGS.

Setzen Sie nun den PROPLUG ins das Ohr ein und achten Sie darauf, das der spitze Teil sich genau in den oberen Teil des Ohrs einfügt (**Abbildung A, Nr. 4**)

Entfernen der PROPLUGS:

Fassen Sie unter die Kante und ziehen Sie den PROPLUG vorsichtig aus dem Ohr. Reinigen Sie die PROPLUGS mit Baumwolle oder Alkohol.

Warnung: Verwenden Sie ausschließlich die „**Vented PROPLUGS**“ (kleines Loch zum Druckausgleich) zum Tauchen. Darf nicht in die Hände von Kinder gelangen. Lassen Sie Ihre PROPLUGS nicht in der Sonne liegen lassen.